

Guía rápida de Uso de LeakControl

Objetivo

Comprobar la existencia de fugas en un endoscopio flexible.

Endoscopio

Se aconseja realizar la prueba de fugas, tal como se describe en este protocolo de guía rápida, antes de cualquier limpieza manual. Este procedimiento está dirigido tanto al personal del departamento de esterilización como al personal de enfermería de endoscopia.

Instrucciones para la prueba de fugas del endoscopio mediante LeakControl

El endoscopio se coloca sobre una alfombrilla (de celulosa) en el recipiente de transporte, y continuar con las siguientes indicaciones para realizar la prueba de fugas.

Configuración

- Encender LeakControl (interruptor situado en la parte trasera del detector de fugas).
- Acoplar la manguera del comprobador de fugas en el conector de LeakControl.



Funcionamiento

- Pulsar el botón de inicio de LeakControl.
- Esperar hasta que el endoscopio se presurice; esto se puede ver por la luz roja intermitente.
- Sumergir el endoscopio totalmente en el recipiente que contiene agua con líquido limpiador. También es posible no utilizar un baño de agua.
- Mover bien la punta y comprobar que no haya fugas (al sumergirla aparecerán burbujas de aire).
- Si no hay fugas, la luz verde del LeakControl parpadeará. Si hay una fuga, la luz indicadora se volverá roja y aparecerá un texto en la pantalla; si éste es el caso, se debe proceder según el protocolo a seguir para endoscopios defectuosos.



Limpieza

- Realizar la limpieza previa manual según el procedimiento habitual.
- Llevar a cabo la limpieza previa manual bajo la presión de LeakControl.
- Sacar del agua todo el endoscopio, aún conectado a LeakControl, si está sumergido.



- Colocar el endoscopio sobre una alfombrilla.
- Pulsa el botón de parada para desinflar el endoscopio.
- Si la luz verde está encendida permanentemente, el endoscopio puede desconectarse de LeakControl.
- El endoscopio puede colocarse ahora en la máquina de desinfección. Para ello, se debe proceder según el protocolo a seguir para desinfección a máquina del endoscopio flexible.