

Nuestros protectores faciales están hechos de policarbonato, lo que los hace seguros para el usuario y su salud:

- No contiene ninguna sustancia tóxica o alérgica
- Son resistentes a la rotura y al agrietamiento
- Son de fácil limpieza y desinfección
- Los productos usados son ecológicos, fáciles de reciclar
- Estas láminas son resistentes a los arañazos. Puede usarse muchas veces, hasta que las huellas de lavado y limpieza comiencen a ser visibles. Le sugerimos hacer un enjuague previo para los desechos más grandes y duros por ambos lados con agua corriente y posteriormente secar la superficie con un paño suave. Para su limpieza se pueden usar la mayoría de los líquidos o aerosoles de desinfección disponibles del mercado.

A continuación encontrará las instrucciones de inicio rápido:




1. Retire la etiqueta de sellado de la cubierta superior del paquete.



2. Abra el paquete.




3. Extraiga la montura con el blister.

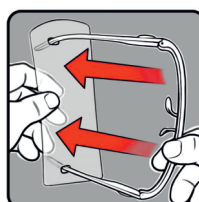


4. Retire el blister de la montura.




5. Saque el protector facial de la caja.

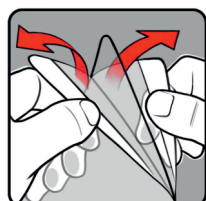

6. Retire las láminas de protección de ambos lados del protector.

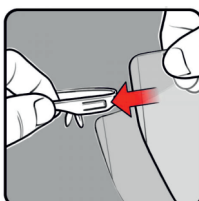

7. Empuje el borde del protector hacia el enganche de la montura.

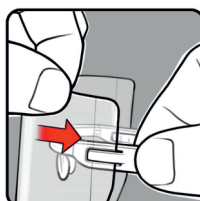


8. Empuje el segundo borde del protector hacia el enganche del lado opuesto.




9. Colóquese el protector facial y ajuste la altura y el ángulo de inclinación si es necesario.




10. Nuestro protector facial se puede usar con gafas ópticas.

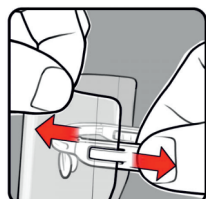

11. Después de su uso, retire la lámina protectora del marco.

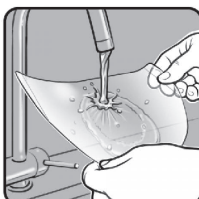

12. Elimine las partículas más duras con agua corriente.

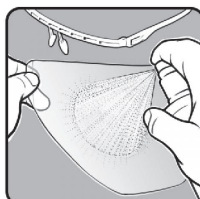

13. Desinfecte la lámina protectora.



14. Seque la lámina protectora con un paño suave.



14. Guarde la montura y la lámina protectora limpia en su caja y cierre la tapa.